



BeneHeart D2

Desfibrilador / monitor

mindray
healthcare within reach



+52 5530479296



ventas@meditecjc.com



www.meditecjc.com

Diseño 4 en 1

Para satisfacer sus necesidades clínicas

BeneHeart D2 es un desfibrilador/monitor compacto y ligero que integra desfibrilación manual, DEA y marcapasos con funciones integrales de monitorización del paciente. Su carga rápida y la administración de energía a niveles personalizados facilitan una reanimación eficaz.

BeneHeart D2 ofrece a los respondedores monitoreo de signos vitales que incluyen ECG, respiración, NIBP y SpO2 para permitir la evaluación continua del paciente.

Escucha

Calidad diagnóstica, monitorización ECG 3/5 con respiración, NIBP y SpO2 de Nellcor o Mindray.

DEA

En modo DEA, el BeneHeart D2 analiza automáticamente el ritmo y determina si es necesaria una descarga. Las indicaciones de voz y texto guían al usuario durante el proceso. También dispone de grabación de voz (180 minutos) para el análisis y la revisión posterior al caso.


Desfibrilación manual

Modo de desfibrilación asincrónica para cardioversión de la fibrilación ventricular; Modo de desfibrilación sincronizada para cardioversión de la fibrilación auricular.

El indicador de contacto de paleta/almoHADILLA proporciona a los usuarios información de impedancia antes de cada descarga.

Estimulación no invasiva

BeneHeart D2 ofrece estimulación externa en modo a demanda y modo fijo, con frecuencias y salida ajustables. La clave 4:1 permite a los médicos seleccionar rápidamente 1/4 de la frecuencia del marcapasos definida para observar el ritmo subyacente del paciente.

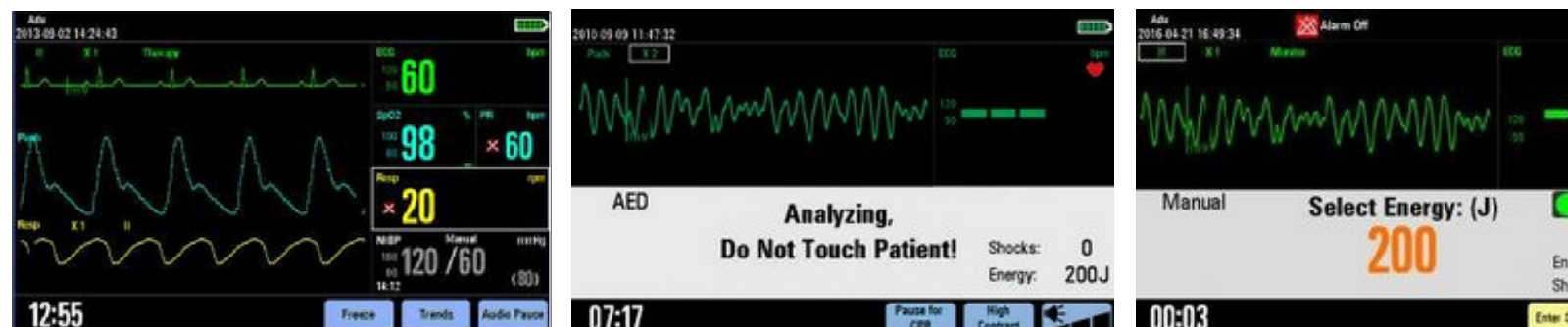

BeneHeart D2



Tecnología de vanguardia

para ayudar a una reanimación eficaz

Tecnología líder en desfibrilación

Tecnología bifásica: forma de onda exponencial truncada bifásica (BTE), ampliamente utilizada en dispositivos de desfibrilación conocidos

Tecnología de compensación de impedancia:



La corriente máxima y el ciclo de descarga se ajustan automáticamente según el cambio de impedancia, logrando mejores resultados de desfibrilación.

Tecnología de indicación de impedancia:

El estado del contacto y la impedancia del paciente se muestran directamente, lo que indica cómo mejorar el contacto de las paletas o elegir la potencia adecuada, mejorando la tasa de éxito de la desfibrilación.

Onda bifásica de alta potencia de 360 J

Estudios clínicos han demostrado que la onda bifásica de 200 J no es eficaz para algunos pacientes con alta impedancia, pero la onda bifásica de 360 J sí lo es. Los desfibriladores Mindray admiten la onda bifásica de 360 J para mejorar la tasa de éxito de la desfibrilación.

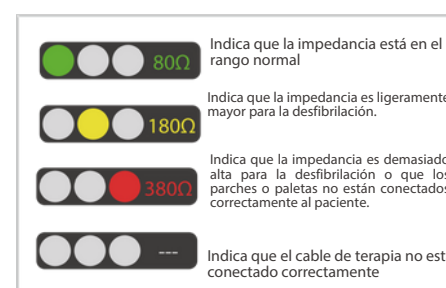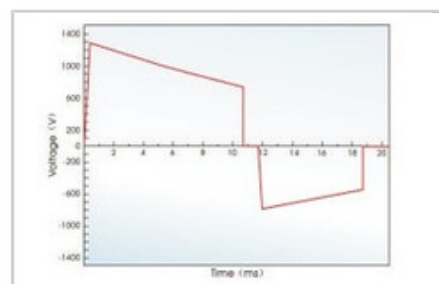

Listo para usar

Autocontrol integral D2 realiza un breve autocontrol regularmente todos los días y un autocontrol integral cada semana. ayudando a los usuarios a conocer su estado.

D2 ejecuta una autocomprobación completa dentro de los 5 segundos posteriores al encendido, para garantizar que el desfibrilador esté listo para usarse en cualquier momento cuando sea necesario.

El usuario puede seleccionar verificación regular/con botón/de alta potencia según las necesidades clínicas.

Indicación de estado El estado se muestra mediante indicadores después de la autointroducción. comprobar. Los usuarios conocerán el estado de un vistazo. El informe de autocontrol se puede configurar para que se imprima automáticamente o se imprima a pedido para que los usuarios lo revisen y para la gestión del dispositivo del hospital.

Componentes clave de calidad Tecnología de gestión inteligente de energía Permite la calibración automática de la capacidad de potencia, sin necesidad de mantenimiento. El condensador eléctrico es suministrado por un proveedor de renombre mundial con décadas de experiencia en el sector y está diseñado específicamente para desfibriladores.



Paletas externas



Las paletas externas se pueden cambiar rápidamente a paletas pediátricas.

Almohadillas



Disponemos de almohadillas desfibriladoras para adultos y pediátricas para satisfacer las necesidades de una variedad de departamentos.

Estuche de transporte



El estuche de transporte mejora la protección y facilita el transporte de los accesorios.

Porta gel



El soporte de gel permite mantener el tubo de gel en la parte posterior del BeneHeart D2 para facilitar el acceso.

Paletas internas



Se pueden seleccionar tres tamaños de pala (1", 2" y 3"). BeneHeart D2 identifica automáticamente su conexión y reduce el nivel de energía por debajo de 50 J para desfibrilación interna.

Cargador de batería



El cargador opcional mantiene dos baterías de repuesto cargadas y listas para usar.

Gancho para barandilla de cama



El robusto gancho para barandilla de cama permite transportar BeneHeart D2 con los pacientes.



+52 5530479296



ventas@meditecjug.com



www.meditecjug.com