



SURTRON

unidades de electrocirugía



CE
0051

Solicita tu cotización  55 3047 9296

SURTRON 400 HP



DOBLE ACTIVIDAD OPERATIVA

- Dos canales de salida para corte monopolar
- Dos calibraciones y canales independientes para las coagulaciones monopolares más frecuentes

PROCEDIMIENTOS DE CORTE CONTROLADOS

- Corrientes de corte intensificadas para incisiones sin escara
- Corrientes de corte con propiedades coagulantes para la disección con sangramiento controlado
- Bajo acoplamiento capacitivo en los procesos endoscópicos a través de corriente Slow BLEND

DOBLES PROCEDIMIENTOS COAGULATIVOS CONTROLADOS

- Coagulación SPEEDY y Coagulación DEEP disponibles para dos operadores
- Coagulación SPRAY activable con mango o pedal

CARACTERÍSTICAS BIPOLARES

- Corte bipolar con control del sangramiento seleccionable
- Corriente de corte Slow Blend
- Start y Stop automáticos de coagulación activables por separado

SEGURIDAD TOTAL PARA EL PACIENTE Y PARA EL CIRUJANO

- Aceptabilidad de la impedancia del contacto entre cuerpo del paciente y placa neutra verificada continuamente por

el control electrónico Skin Plate Electronic Control (SPEC)

- Monitoraje continuo de la corriente de dispersión a radiofrecuencia
- Variación de la tensión de red compensada automáticamente antes de empezar la erogación de potencia a radiofrecuencia

PROCEDIMIENTOS PERSONALIZADOS

- Selección independiente de las corrientes coagulativas y de los niveles de potencia de cada uno de los dos operadores
- Diez procedimientos personalizados configurables e inmediatamente seleccionables

CONDUCCION DE EXTENSIONES Y SEÑALES DE ENLACE

- Ataques de conexión para ARGON Plasma y Aspirador de Humos

AUTODIAGNOSIS AUTOMATICA

- Control diagnóstico automático de la completa funcionalidad actual de la unidad electrónica y de los accesorios conectados e indicación codificada de los malos funcionamientos encontrados

*Coagulación SPEEDY llamada también Fulgurate or FORCED
**Coagulación DEEP llamada también Pin Point, Dessicate o SOFT

400 HP

Código

Potencia máxima de corte monopolar pure - CUT
Potencia máxima de corte y coagulación monopolar - CUT 80%
Potencia máxima de corte y coagulación monopolar - CUT 60%
Potencia máxima de corte y coagulación monopolar CUT 40%
Potencia máxima de corte monopolar ENHANCED
Potencia máxima de corte y coagulación monopolar BLEND
Potencia máxima de coagulación monopolar SPEEDY
Potencia máxima de coagulación monopolar DEEP
Potencia máxima de coagulación monopolar SPRAY
Potencia máxima de coagulación monopolar SPRAY ARGON
Potencia máxima de corte bipolar - CUT
Potencia máxima de corte y coagulación bipolar - CUT 80%
Potencia máxima de corte y coagulación bipolar CUT 60%
Potencia máxima de corte y coagulación bipolar - CUT 40%
Potencia máxima de corte y coagulación bipolar - BLEND
Potencia máxima de coagulación bipolar-COAG
Frecuencia de trabajo Monopolar/Bipolar
Placa paciente / Placa neutra
Entrada alimentación seleccionable
Frecuencia de alimentación
Potencia máxima de absorción
Dimensiones (L-A-P)
Peso

10400.901
400 W-300 Ω
300 W - 300 Ω
250 W-300 Ω
200 W-300 Ω
250 W - 500 Ω
250 W-300 Ω
120 W-500 Ω
120 W-200 Ω
100 W-2000 Ω
100 W 2000 Ω
95 W-150 Ω
95 W-150 Ω
95 W-150 Ω
60 W-150 Ω
90 W150 Ω
70 W-100 Ω
425 kHz/525 kHz
F
115-230 Vac
50-60 Hz
1000 VA
470x150x400
17,5 Kg



- CIRUGÍA AMBULATORIAL
- CIRUGÍA PEDIÁTRICA
- CIRUGÍA PLÁSTICA
- CIRUGÍA TORÁCICA
- CIRUGÍA VASCULAR
- DERMATOLOGÍA
- CIRUGÍA ENDOSCÓPICA
- GASTROENTEROLOGÍA
- GINECOLOGÍA
- NEUROCIRUGÍA
- ORTOPEDIA
- OTORRINOLARINGOLOGÍA
- NEUMOLOGÍA
- UROLOGÍA
- VETERINARIA

NORMAS

EN60601-1
EN60601-1-2
EN60601-2-2
Clasificación Eléctrica: I CF
DDM 93/42/CE Clase IIb

CONTROLES

Control circuito placa/paciente OC
Control de la potencia
Autochequeo
Control de las corrientes de dispersión en HF
Compensación del flujo de la red

400 HP

Composición Estándar:

Mango desechable con pulsantes (5 ud)
Mango riutilizable con pulsantes
Electrodo a lámina corto (3 ud)
Electrodo a lámina largo (3 ud)
Electrodo a aguja corto (3 ud)
Electrodo a bola corto (3 ud)
Cable de electrodo neutro
Electrodo neutro partido desechable (5 ud)
Esponja limpia electrodo
Doble pedal de pie (2 ud)
Cable de alimentación 5 metros

755VL
F4243
152-110
152-115
152-120
152-150
00404.08
F7920
F7520
00305.04
00100.01



Consulta nuestros métodos de compra



Transferencia
bancaria

Efectivo



VISA



Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5530479296



ventas@meditecjcjg.com



www.meditecjcjg.com