

HyBase 3000

Mesa de operaciones



HyBase 3000

Práctica funcionalidad, versatilidad y alta fiabilidad

Presentación funcional del panel remoto



Posición normal



Desplazamiento longitudinal hacia el lado de la cabeza de 300 mm



Elevación de la mesa



Descenso de la mesa



Posición de Trendelenburg



Posición de Trendelenburg inversa



Inclinación a la izquierda



Inclinación a la derecha



Elevación de placa de respaldo



Descenso de placa de respaldo




Posición flexionada



Posición cóncava



Posición "0"

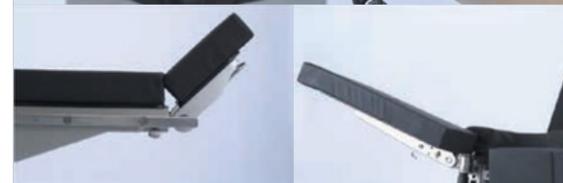

Elevación del reposacabezas



Descenso del reposacabezas Elevación y descenso de la placa para piernas, 180° de separación



Flexibilidad máxima



Elevador integrado para puentes torácico y renal



Con un diseño especial adaptado a la cada vez más compleja infraestructura quirúrgica, HyBase requiere menos esfuerzo y tiempo para colocar al paciente en una posición segura, cómoda y práctica. Tras analizar las necesidades de los cirujanos y el personal de enfermería, la respuesta de Mindray es una mesa de operaciones que constituye una solución total e incluye lo siguiente:

- Colchón de mejor calidad para mayor comodidad de los pacientes
- Sistema de colocación del paciente seguro y práctico Tecnología
- para maximizar la versatilidad




- Colchón de descompresión con diseño antiestático, impermeable y de una pieza.
- Desplazamiento longitudinal máximo hasta 300mm hacia la cabeza, libre de arco en C.
- Capacidad de carga hasta 230kg.
- Alimentación por batería para 50-80 intervenciones.
- Sistema de freno mecánico en las ruedas para una estabilidad óptima.
- Restablecimiento de la posición original (posición "0") con un botón.
- Tablero radiolúcido para facilitar el uso de arco en C.
- Tres formas de control: control remoto, panel de respaldo y control pedal(opcional).



MEDITEC

Gama perfecta de productos Mindray para quirófano

Los productos fiables e innovadores de Mindray se complementan a la perfección entre sí para ofrecerle el mejor servicio posible.

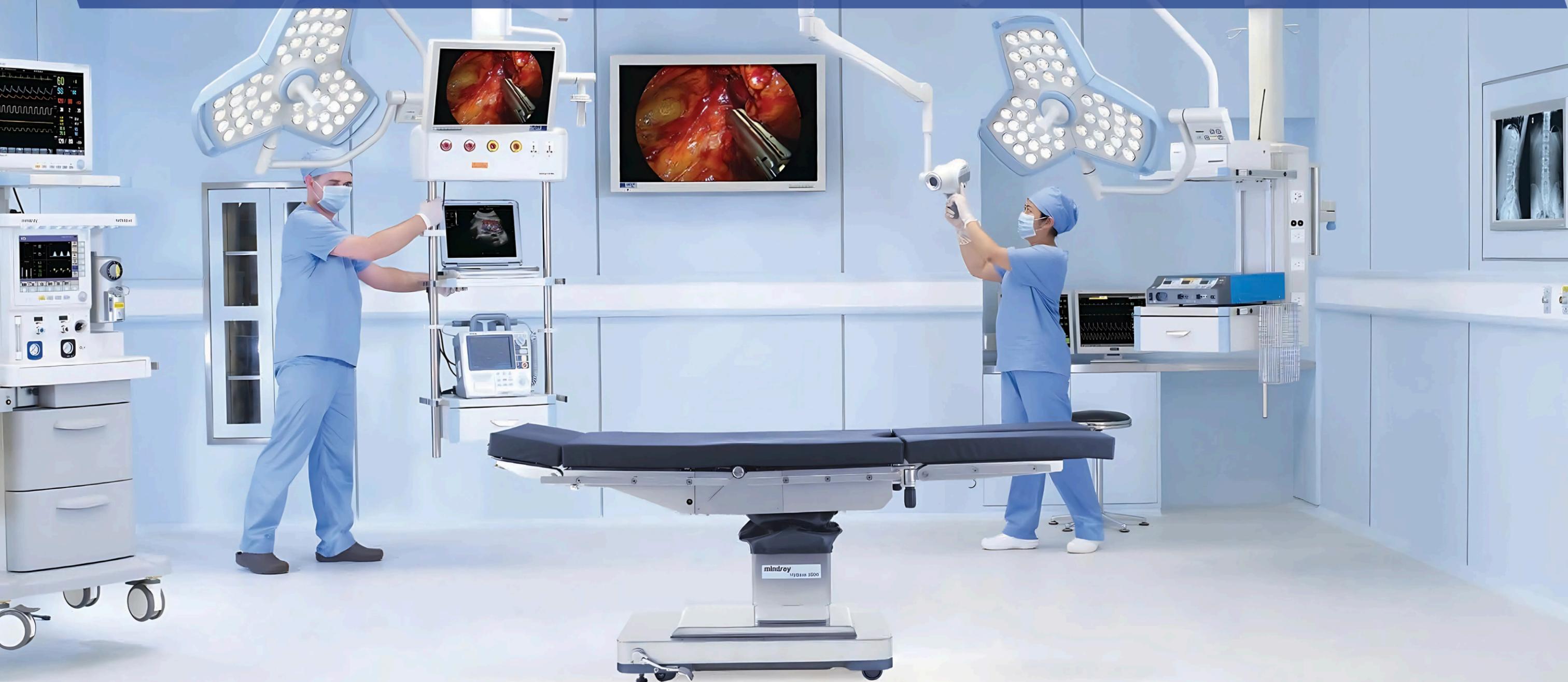

HyBase 3000

La técnica de posicionamiento más adecuada para todas las disciplinas quirúrgicas

El éxito de una operación comienza con el perfecto posicionamiento del paciente y para ello se necesita un acceso cómodo, resultados excelentes, ahorro de tiempo y eficiencia. La excepcional flexibilidad de HyBase 3000 junto con sus diversos accesorios hace posible proceder a cualquier posicionamiento del paciente de manera rápida y segura.

Usamos acero inoxidable de alta calidad para las mesas de operaciones y los accesorios. Para facilitar el acceso de los cirujanos al brazo en C, las almohadillas y las placas son radiotransparentes para los exámenes radiográficos. Para evitar lesiones en áreas sensibles de los pacientes, suministramos almohadillas de gel de textura similar al tejido humano para colocar a los pacientes.



Posición para intervención intervertebral

Accesorio:
0092-30-102639 Almohadilla para intervenciones intervertebrales (espuma viscoelástica, una pieza)
115-005864-00 Almohadillas de sujeción para la cabeza (280 x 240 x 140 mm)
0092-30-102634 Placa para brazos



Posición para cirugía rectal

Accesorio:
115-007049-00
Dispositivo de colocación para intervenciones rectales
115-005864-00 Almohadillas de sujeción para la cabeza (280 x 240 x 140 mm)
0092-30-102640 Correa para el tronco, una pieza
0092-30-102634 Placa para brazos



Posición general para intervención de tiroides



Posición para intervención oftálmica

Accesorio:
115-007045-00 Placa para intervenciones oftálmicas
115-005857-00 Almohadillas para cabeza en forma de flotador (200 x 70 x 50 mm)
0092-30-102642 Adaptador de reposacabezas para neurocirugía



Posición para intervención en brazos o manos

Accesorio:
115-007047-00 Mesa de operaciones para brazos
115-005873-00 Almohadillas para cabeza en forma de flotador (200 x 70 x 50 mm)



Posición supina general para intervención con movimiento longitudinal hacia el lado de la cabeza de 300 mm

Accesorio:
115-005873-00 Almohadillas para cabeza en forma de flotador (200 x 70 x 50 mm)



Posición para neurocirugía

Accesorio:
115-012835-00 Reposacabezas en forma de herradura ajustable
0092-30-102642 Adaptador de reposacabezas para neurocirugía



El adaptador para neurocirugía permite conectar el marco Mayfield

Accesorio:
0092-30-102642 Adaptador de reposacabezas para neurocirugía

HyBase 3000

La técnica de posicionamiento más adecuada para todas las disciplinas quirúrgicas

Desarrollados en estrecha colaboración con los usuarios finales, estos accesorios satisfacen todas las necesidades que surgen durante los procedimientos de colocación para la intervención quirúrgica y permiten colocar a los pacientes de forma óptima tanto para los cirujanos como para los pacientes.



Posición de litotomía para ginecología y urología

Accesorio:
115-007043-00 Un pieza de soporte para piernas con cintas y una abrazadera radial universal ligera
115-013018-00 Cubeta de desagüe para ginecología y urología



Posición de litotomía

Accesorio:
0092-30-102635 Soporte para piernas pesado de una pieza, abrazadera radial universal pesada, almohadilla y correa de sujeción (una pieza).
115-013018-00 Cubeta de desagüe para ginecología y urología



Posición lateral para cirugía mínimamente invasiva

Preparación rápida para cirugía mínimamente invasiva con elevador integrado de 120 mm



Posición lateral para cirugía mínimamente invasiva

Accesorio:
0092-30-102634 Placa para brazos
0092-30-102648 Soporte de brazos para posición lateral
0092-30-102638 Soporte para partes grandes del cuerpo
0092-30-102669 Soporte para partes pequeñas del cuerpo
115-005873-00 Almohadillas para cabeza en forma de flotador (200 x 70 x 50 mm)



Posición para intervención femoral

Accesorio:
115-009425-00 Dispositivo de extensión para ortopedia con carro de transporte



Posición lateral para intervención femoral

Accesorio:
115-007057-00 Extensión de fémur lateral
115-009425-00 Extensión para ortopedia preseleccionada



Posición para intervención de tibia

Accesorio:
115-007055-00 Extensión de tibia
115-009425-00 Extensión para ortopedia preseleccionada



Posición para intervención de tibia

Accesorio:
115-007055-00 Extensión de tibia
115-009425-00 Dispositivo de extensión para ortopedia con carro de transporte



Traumatología para el cuello del fémur

Accesorio:
115-007055-00 Extensión de tibia
115-009425-00 Dispositivo de extensión para ortopedia con carro de transporte